

## 齿科全效多酶清洗剂说明书

**产品名称:** 麦迪康牌齿科全效多酶清洗剂

**产品规格:** 1L/瓶(4瓶/箱), 5L/桶(2桶/箱)

**产品型号:** MED-CDE010015 (1L)

MED-CDE010017 (5L)

**产品成分:** 本品由蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶等多种酶, 使用专用技术复合而成, 本品含非离子表面活性剂、螯合剂、酶活性保护剂。

**适用范围:** 本品适用于齿科诊疗器械的手工清洗及机械清洗。

### 产品特点:

- 复合多酶配方可有效去除齿科器械表面的血液、组织液、脂肪等有机污染物。
- 可有效去除齿科器械表面的细菌生物膜, 降低感染风险。
- 中性pH值(6.5-7.5), 不会对不锈钢器械造成损伤。
- 无泡配方, 确保手工清洗时的液面能见度, 降低手工清洗过程中被器械刺伤风险。

### 使用方法:

手工清洗 建议配比 1:200~1:300 (每1L水中加5ml清洗剂)。建议水温: 25~30°C。建议清洗时间: 至少2分钟。

- 超声清洗 建议配比 1:200~1:300 (每1L水中加3~5ml清洗剂)。建议水温: 25~30°C。

建议清洗时间: 至少2分钟, 不宜超过10分钟。



➤ 机械清洗 建议配比 1:200~1:500 (每 1L 水中加 2~5ml 清洗剂) 。建议水温: 45~55°C。

建议清洗时间: 至少 5 分钟。

污染程度	建议配比浓度
轻度污染	1:300~1: 500 (1L 水中加 2~3ml 本品)
中度污染	1:200~1:300 (1L 水中加 3~5ml 本品)
重度污染	1:100~1:200 (1L 水中加 5~10 本品)
干涸污染物	1:50~1:100 (1L 水中加 10~20ml 本品)
牙椅管路生物膜去除	1:50 (1L 水中加 20ml 本品, 冲洗时间至少大于 2 分钟)

#### 注意事项:

- 请操作人员遵循相关国家、行业规范在清洗作业前佩戴好防护用具。
- 请避免本品 (或含有本品的溶液) 与皮肤长时间直接接触。
- 如本品 (或含有本品的溶液) 不慎入眼, 请用大量清水冲洗, 并及时就医。
- 本品不宜与其他品牌同类产品混合使用。每次使用完毕后请旋紧瓶盖。
- 若配置好的清洗剂溶液使用后, 溶液中存在大量污染物或出现溶液浑浊现象, 请重新配置新清洗剂溶液更换, 避免器械交叉污染风险。

#### 存储方法:

室温存储。请将本品置于阴凉、避光、干燥处保存。

生产日期及批号: 见标签

产品有效期: 2 年



**A.R.Medicom Inc. Healthcare(Shanghai)Limited**

麦迪康医疗用品贸易(上海)有限公司

上海市长宁区新华路728号915-919室

邮编: 200025

电话: 021-5273 9363

传真: 021-6282 0042

电邮: info@medicom-china.com

生产单位(受托方): 上海善长生物科技有限公司

生产地址: 上海市松江区车墩镇车阳路239号3幢3楼厂房B区

